

PRODUCTO:	Bata de Cirujano con Refuerzo	CLAVE SECTOR SALUD:	060.231.0674
TALLA:	Chica	CONTENIDO:	1 Pieza
REG. SANITARIO:	3350C2024 SSA	ESTERILIZACIÓN:	Gas Óxido de Etileno (ESTERIL OE)

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Material:** Fabricado en tela no tejida SMS 100% polipropileno grado médico de 25 g/m².
- **Propiedades de Barrera:** Impermeable y repelente a la penetración de líquidos y fluidos corporales.
- **Seguridad e Higiene:** Color antirreflejante, no transparente, no genera pelusa, libre de látex, no flamable.
- **Refuerzo:** Área reforzada en zona frontal y mangas para mayor protección en procedimientos de alto contacto con fluidos.

2. INDICACIONES DE USO

Indicado para personal médico y de enfermería en procedimientos quirúrgicos y de exploración que requieran un entorno estéril y protección de alta barrera contra fluidos infectocontagiosos.

3. PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN (TÉCNICA ASÉPTICA)

1	Inspección Previa y Apertura Verifique que el empaque primario se encuentre íntegro y en óptimas condiciones. Abra la bolsa de manera aséptica dentro del área limpia o quirúrgica sin tocar la superficie interna de la bata.
2	Despliegue Aséptico Sujete la bata firmemente por el cuello interno (zona de contacto no estéril con la piel) y levántela verticalmente permitiendo que se despliegue por gravedad. Asegúrese de que no toque superficies no estériles.
3	Colocación de Extremidades Introduzca simultáneamente ambos brazos en las mangas manteniendo las manos a la altura de los hombros hasta deslizar las extremidades. En técnica cerrada, mantenga las manos dentro del puño.
4	Ajuste y Cierre Posterior El personal asistente (circulante) deberá jalar la bata desde la parte posterior interna y ajustar los sujetadores del cuello y la cintura, asegurando que la espalda quede completamente cubierta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- **Producto de un solo uso (Desechable):** No reesterilizar ni reutilizar. El reúso puede comprometer la barrera de protección e incrementar el riesgo de contaminación cruzada.
- **Integridad del empaque:** No utilizar si la envoltura se encuentra abierta, húmeda, rota o perforada.
- **Almacenamiento:** Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, la humedad y a temperatura ambiente.

Fabricado por: Medical Dress Supplier, S.A. de C.V. (RFC: MDS220504HBO)
Cerrada 5 de Mayo S/N, Col. Jacalones I, C.P. 56604, Chalco de Díaz
Covarrubias, Estado de México.
Tel. 55 3330.8800 | ventas@mdsprovemedic.com | www.mdsprovemedic.com

Reporte de incidentes (Tecnovigilancia):
tecnovgsti@gmail.com

Certificaciones: ISO 9001 | AENOR | IQNet | GMP